


Manual de operación báscula PESA-PERSONAS modelo PP-150/300



GRACIAS POR PREFERIR UNA BASCULA METROLOGY. Para obtener el mayor provecho de su nuevo equipo de precisión, es importante que lea cuidadosamente este manual, antes de usar.


I. Precauciones:

- 1.- No rociar con Agua directamente el modulo indicador, en caso de accidente, favor de secar inmediatamente.
En caso de funcionamiento irregular favor de reportar a servicio técnico especializado.
- 2.- La báscula está diseñada para operar a temperatura ambiente, por lo que no debe ser operada en áreas con una alta humedad y calor excesivo.
- 3.- No golpear o sobrecargar (más de su 100% de capacidad), la plataforma de la báscula.
- 4.- Al encender la báscula verifique que no muestre \pm este símbolo en la pantalla, pues esto significa que la batería tiene baja carga, por lo que es necesario sustituirlas por otras nuevas, su báscula opera con baterías AAA.
Si no va a usar la báscula por largos periodos de tiempo le recomendamos quitar las baterías para evitar daños.
- 5.- No utilizar químicos ni solventes para la limpieza de la báscula, solo es necesario un paño húmedo.

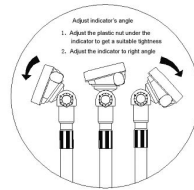

II. Ajuste del Angulo del Indicador:

II. Mensajes y descripción del Desplaye:

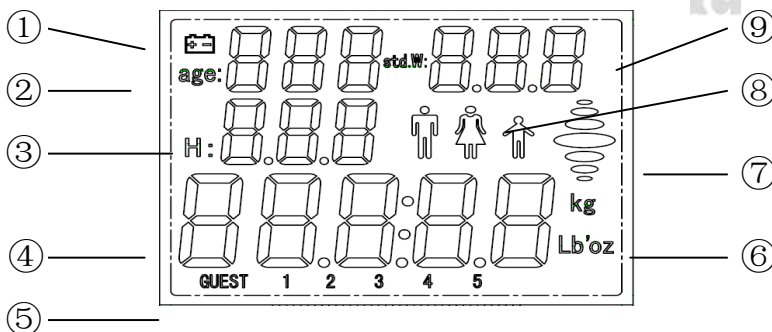

- ① Símbolo de BAJO VOLTAJE
- ② Muestra la EDAD registrada.
- ③ Muestra la Altura registrada.
- ④ Muestra el PESO registrado por la báscula.
- ⑤ Indica el # de miembro o paciente.
- ⑥ Unidad de peso seleccionada.
- ⑦ Muestra la comparativa entre el Peso Estándar y El peso Real; la zona central indica que estas dentro del peso Estándar.
- ⑧ Muestra el SEXO del usuario.
- ⑨ Muestra el Peso estándar según tablas médicas.

IV. Descripción de las funciones del teclado:

On/off — Encender y/o apagar el equipo

CH — Cambiar de paciente durante el pesaje o para
Seleccionar la función.

Save — Grabar datos

Zero — Corregir a Zero.

Hold — Bloquear el peso.

Func — Confirmar operación.

V. Programación y Operación

Programación de la Edad, Altura y Sexo:

Presionar “Func” estando en el modo de peso, entonces en la pantalla de peso se muestra “UNIT”, y la sección donde aparece la altura empieza a parpadear, en este momento iniciamos la programación de cada uno de los 5 pacientes o miembros, para cambiar el número presiones “CH” hasta que aparezca el número deseado (del 1 al 5), mantener presionada la tecla de “Save” para grabar y dar paso a la programación de la Altura, Sexo y Edad.

①、 Programar la Edad

Después de programar el número de paciente o miembro de familia, en la pantalla del peso aparecerá de manera intermitente la palabra “AGE”, en caso de no aparecer esta palabra oprimir la tecla “CH”, hasta que aparezca, paso seguido presiones “Hold”, el display de peso mostrará fija la palabra “AGE” mientras que en la pantalla de la edad se muestran 000, para cambiar los valores de cada dígito presiones la tecla “CH” hasta obtener el valor deseado, paso seguido oprimir la tecla “Save” para grabar este valor y pasar al siguiente dígito y así sucesivamente para cada dígito de la edad; la cual se captura en años cumplidos, al finalizar presione la tecla “Hold” para confirmar la edad, entonces la palabra “AGE”, aparecerá intermitentemente, si cometió algún error presione “Zero” para cancelar la edad programada. en el paso anterior;

②、 Programar la Altura:

Después de programar la edad, presione “CH” y la pantalla mostrará intermitentemente “HEIGH”, presione “Hold”, para confirmar y fijar la altura, entonces la pantalla quedará fija en la palabra “HEIGH”, mientras que en la sección de la altura se muestra “0.00” para cambiar los valores de cada dígito al igual que en la edad presiones la tecla de “CH” hasta fijar el valor deseado y posteriormente presione “Save” para grabar el pasar al siguiente dígito, repitiendo esta operación por cada dígito requerido (La altura se maneja en cm, por lo que si usted mide 1.80m, debe capturar 180), para grabar el dato de altura presiones “Hold”, entonces la palabra “HEIGH”, aparecerá intermitentemente, si desea corregir la altura capturada presione “Zero” para cancelar la operación anterior;

③、 Fijar el SEXO

Presione “CH” y la pantalla mostrará de manera intermitente la palabra “SEX”, presione “Hold” y la pantalla fijará la palabra “SEX” y comenzará a destellar el símbolo del SEXO, presione la tecla “CH” para seleccionar el sexo y presiones “Hold” para confirmar, entonces la pantalla mostrará de manera intermitente la palabra “SEX”, si desea corregir presione “Zero” para cancelar la operación anterior.

Cuando la pantalla muestre de manera intermitente “AGE/HEIGH/SEX”, presione “Zero” para salir del modo de programación...

Operación

Para seleccionar el miembro o paciente a pesar presiones “Func” estando en el modo de peso, entonces la pantalla de peso mostrará intermitentemente “UNIT”, y la pantalla del peso mostrará de forma intermitente los números de los pacientes registrados, para seleccionar presione “CH” hasta localizar el # de paciente o miembro deseado y presiones “Hold” para confirmar, entonces la pantalla mostrará los datos capturados de ese paciente o miembro (Edad, Altura y Sexo).

Después de seleccionar al paciente o miembro, puede indicar la operación de peso, así en la pantalla podrá observar como es el peso del paciente o miembro en cuestión con referencia a las tablas médicas pre-establecidas según los parámetros de Edad, Sexo y altura.

2、 Grabar el peso de un paciente o miembro.

Después de seleccionar al miembro o paciente, se sube a la báscula y cuando el peso este fijo Presione “Hold” para fijar este valor el cual se mostrará de manera intermitente en la pantalla, posteriormente

presione "Save", la pantalla mostrara de manera intermitente "UNIT", y en la sección de altura se mostrara el # del pacientes o miembros registrados, selecciones el # deseado presionando "CH" y después mantenga presionada la tecla "Save" hasta que el display muestre "SAVE", esto indica que el proceso finalizo.

3. Revisar el cambio de peso de cada paciente o miembro.

Si anteriormente grabo el ultimo peso registrado de cada paciente puede recordarlo presionado "On/off" cuando la báscula esta en el modo de peso, entonces la pantalla mostrara "REL", con el peso registrado durante la última visita o registro, indicando común signo + - su el peso subió o bajo. Presiones "On/off" nuevamente para salir de este modo de operación.

4. Cambiar la unidad de peso, el rango de Zero y la división mínima.

Presione "CH" en el modo peso, hasta que la pantalla muestre a "Kg/Lb", presione "CH" para seleccionar la unidad de pesaje, después presione "Func" para confirmar la unidad, entonces el display mostrara "ro *.*" presione "CH" para seleccionar el rango de corrección a ZERO, presione "Func" para confirmar y pasar al siguiente parámetro; en el display se muestra "d= *", presione "CH" para seleccionar la división mínima con la que desea trabajar y posteriormente presiones "Func" para confirmar. Y regresar al modo de peso.

Durante este proceso si desea salir de este modo de operación presione "Zero" en cualquier momento y retornara al modo de peso.

Nota estos cambios afectan el sistema de parámetros sea cuidadoso !!

5. Modificar tiempos de Auto-apagado y velocidad de pesaje.

Presione "Hold" en el display se mostrara auto-off time " *: **", (el modo de apagado automático cuenta con 5 opciones 20s, 40s, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos.), para seleccionar el tiempo deseado presiones "CH" y posteriormente presione "Func" para confirmar y continuar con la velocidad de pesaje

Al ingresar al modo de cambio de velocidad de pesaje la pantalla mostrara "SPd *", el valor mas pequeño significa la mayor velocidad, presione "CH" para seleccionar la velocidad deseada y después presione "Func" para confirmar.

Nota estos cambios afectan el sistema de parámetros sea cuidadoso !!

Vi. Otras instrucciones

1. Batería: La báscula utilice baterías alcalinas AAA; si el voltaje de la batería es bajo, en la pantalla se muestra el símbolo de bajo voltaje, lo cual significa que debe cambiar las baterías., si el voltaje sigue siendo bajo entonces mostrara "Lo" y se apagara.

2. Otros mensajes:

- **-LO-:** Bajo Voltaje, cambiar baterías.
- **UnSTA:** La báscula no está estable, existen vibraciones o corriente de aire.
- **-OF-:** Significa sobrecarga de peso.
- **-SYS-:** Error de sistema, requiere servicio.



Equipo distribuido por:

POLIZA DE GARANTIA PARA BASCULA ELECTRONICA MARCA METROLOGY:

Basculas y Accesorios de Peso S.A. de C.V. (BAPESA), con domicilio en Diego Rivera #138, Col. Jardines de San Nicolás Municipio de San Nicolás de los Garza, en el estado de Nuevo León, garantizan este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o de mano de obra que el equipos presente durante un periodo de 1 AÑO, a partir de la fecha de compra original.

En caso de que su equipo presente alguna falla durante el año que cubre esta garantía, usted deberá acudir con el distribuidor donde adquirió el equipo, o en su defecto al centro de servicio indicado. Al momento de presentarse con su distribuidor o centro de servicio indicado; El equipo debe ser entregado en su empaque y con sus accesorios originales, así mismo deberá presentar esta póliza de garantía en original con los datos de venta y el sello del distribuidor que le vendió el equipo, debidamente llenados o bien presentar anexa la copia de su factura.

Limitaciones de la Garantía: La garantía para basculas Electrónicas METROLOGY es válida siempre y cuando cumpla con los siguientes criterios:

- a) Que el equipo sea utilizado adecuadamente según sus características.
- b) Que el sello de seguridad y la placa de serie no estén violados o mutilados.
- c) Que no sea utilizado en ambientes o situaciones para las que no fue diseñado.
- d) Que el equipo no sea modificado, reparado o alterado por personas no autorizadas por BAPESA.

Nota: Es importante mencionar que en esta garantía NO cubre ningún tipo de reparación y/o o servicio a domicilio, por lo que es responsabilidad del dueño del equipo llevarlo directamente con su distribuidor o centro de servicio asignado.

e) Por su parte algunos distribuidores ofrecen pólizas de garantía extendidas donde podrán ofrecer el servicio a domicilio, para este efecto la garantía solo es válida con el distribuidor que así lo ofrezca.

f) Basculas y Accesorios de Peso S.A. de C.V. ni nuestros centros de servicio ofrecen garantías extendidas o adicionales de ningún tipo, aun cuando esto sea por escrito o por omisiones de esta póliza.

Esta póliza no cubre las pérdidas o mermas de productos almacenados o procesadas con este equipo.

Como Obtener su Garantía:

- 1.- Antes de acudir a su distribuidor o centro de servicio verifique la falla que presenta su equipo y consulte la guía de solución en su manual de operación para solucionar el problema, en caso de no poder resolverlo pase al siguiente punto.
- 2.- Comunicarse con el distribuidor que le vendió el equipo para que lo asesore en la solución del problema que su equipo presenta, en caso de no resolverlo pasar al punto 3.
- 3.- Acuda con su distribuidor y solicite la garantía de su equipo, para este efecto deberá entregar a su distribuidor una carta donde detalla la falla que ocurre con su equipo, así mismo deberá entregar su póliza y el equipo con su empaque y accesorios originales.
- 4.- En el caso que su distribuidor no le dé respuesta a su petición favor de reportarlo a la siguiente dirección de correo electrónico: contacto@basculasmetrology.com.mx o bien comunicándose directamente al siguiente número telefónico 0181-83514631.
- 5.- En caso de requerir servicio a domicilio contactarse con su distribuidor para que le cotice este tipo de servicio.

Centro de servicio autorizado: Diego Díaz de Berlanga # 172- Local 5

Col. Villas de Santo Domingo
San Nicolás de los Garza, N.L.
Tel: 0181-83514631

La siguiente información debe ser llenada completamente ya que el no hacerlo implica la invalidación de la GARANTIA del equipo.

Distribuidor Autorizado: _____

Dirección del Distribuidor: _____

Fecha de Compra: _____ **Modelo:** _____ **Serie:** _____

Sello del distribuidor: